

智能玻片打号机 日常注意及保养指南

日常操作流程

- 1、日常开机：**短按1s设备开关机按钮，等待软件启动。
- 2、装载玻片：**在装载玻片时，请根据储料盒的标识从上向下装载。
- 3、安装进料盒：**将进料盒上的凸点对准设备上的定位槽放置，确保进料盒把手朝向设备外侧。当进料盒与定位槽之间无明显间隙时，说明进料盒已正确装载。
- 4、添加病理号：**在编辑界面中，点击“添加”按钮以输入病理号。完成输入后，点击“打印”按钮开始打印。
- 5、日常关机：**长按设备开关机按键三秒，系统会弹出关机确认消息框，点击“确认”按钮，等待触摸屏熄灭后完成设备关闭。



为确保设备安全与电源适配器寿命，应正确放置电源适配器，选择干燥通风的环境，避免高温和潮湿，并确保良好的散热。

常见故障处理

- 载玻片在进料盒中未能正常下落，请重新整理载玻片，使其平整后再进行装载。
- 出现异常提示弹框：
 - ① 根据弹框提示进行复位操作。
 - ② 若复位失败，手动取出载玻片，然后点击“复位”按钮。
- 打印不清晰：
 - ① 关闭设备，打开维修门。
 - ② 拿无尘布蘸酒精擦拭激光器镜头，若无效请联系维修人员。

智能玻片打号机 清洁介绍

手持吸尘器

- 1、确保手持吸尘器的电池已充满电。
- 2、根据使用场景，选择安装“长嘴”或“毛刷”。
- 3、开始工作时，打开手持吸尘器的电源开关。
- 4、手柄可根据不同场景进行旋转使用。

(注：旋转方向)



手持吸尘器



注意事项

- 1、清洁区域包括进/出料槽和打印位置。
- 2、使用手持吸尘器，轻扫清洁区域中的粉尘，避免飞溅。
- 3、请勿使用不带毛刷的手持清理器。
- 4、若发现毛刷磨损，请及时更换。
- 5、建议每周至少进行一次清洁，以确保设备的正常运行。