

# 全自动组织脱水机 简易操作指南

达科为  
DAKEWE

## 开机

启动脱水机:

打开**设备背面**电源开关

点击“解锁屏幕”

登录用户账号

## 运行

### 放入组织篮

1. 点击“**开盖**”，待屏幕显示“缸盖已经打开”，打开组织缸盖。
2. 放入组织标本后，关上缸盖并用手轻压缸盖，以确保缸盖关闭到位，点击“**关盖**”，缸盖将被自动锁紧。



### 启动程序

1. 点击“**更多程序**” → 选择程序 → 点击“**运行**” → 确认放入组织标本后 → 点击“**立即启动**” 或者输入预约结束时间点击“**延时启动**” → 点击“**启动程序**”。
2. 如果已经设置快捷程序，在主界面选择程序如“标准组织过夜”，其他步骤同1。



### 取样品

程序运行完成后，选择“**排液**”排放液体，等待试剂排完后，打开缸盖取出样本篮。



### 清洗程序

取出样本篮后，关闭缸盖，在自动弹出的清洗程序窗口，选择“**标准清洗**”，设备将运行标准清洗程序。



### 暂停程序

程序运行过程中，点击“**暂停**”，程序处于浸泡阶段时暂停成功。程序暂停时，点击“**继续运行**”，程序继续运行；点击“**终止程序**”，试剂排液后程序终止。



### 注意事项:

1. 暂停程序非必要流程，仅在第一步想要添加组织样品、或特殊情况下使用。
2. 开始脱水程序前检查试剂瓶液位及蜡缸液位是否足够；
3. 取出样本篮时请注意避免样本篮上的残蜡滴入电子锁孔；
4. 更换试剂后请注意拧紧试剂瓶盖防止泄露；
5. 定期清理组织缸、密封圈、液位传感器探头，防止石蜡或其他杂质附着；
6. 定期清理组织缸底部滤网，防止标本碎屑积累堵塞；
7. 注意仪器显示的各项信息，及时采取相应的措施。