

SC2000全自动染色封片机 简易操作指南

达科为
DAKEWE

开机

①启动染色系统:

取出试剂缸盖及玻片架

打开右侧电源开关

登录染色系统

②启动封片系统:

打开左侧电源开关
系统自动登录

更换盖玻片
丢弃隔夜盖玻片

务必确认托盘为
9层、空盘、清洁

确保有充足
固封剂、清洗液

运行


加载玻片架

1. 缓慢拉出染色系统抽屉，将架子放入加载站点，注意**载玻片标签朝向自己**
2. 关闭抽屉
3. 运行染色程序



更换托盘

1. 点击封片系统中“暂停”→“更换托盘”→“确定”
2. 取出托盘，然后放入9层空托盘
3. 点击“确定”

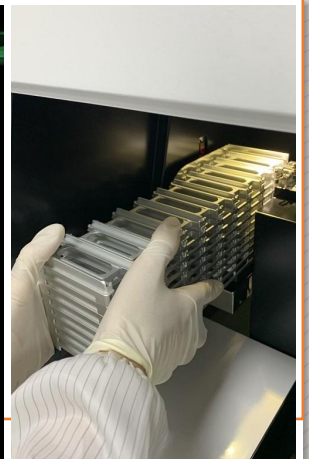


添加盖玻片

1. 点击“暂停”→“更换盖玻片”→“确认”
2. 取出盖玻片盒，添加盖玻片，重新放回盖玻片盒
3. 点击“确认”



取出玻片架

当系统提示：
“出料槽满载”时，
请及时取出玻片架

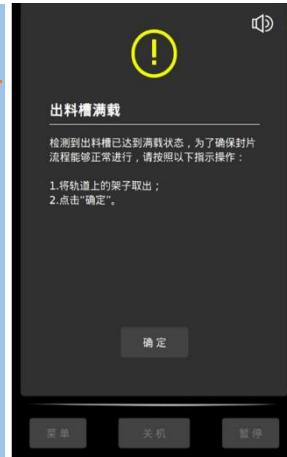

关机

①关闭染色系统



②关闭封片系统

