

水洗缸溢水口向左放置




试剂缸务必放置平齐



提起挂钩再移动机械臂，防止撞弯挂钩



中转站点放置方向

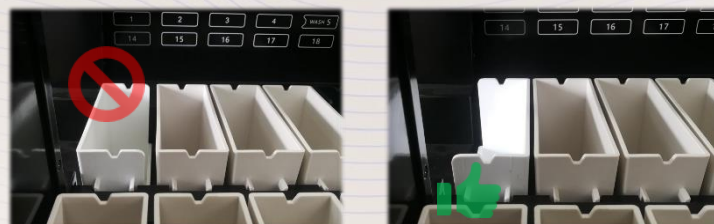

运行染色程序前务必取出试剂缸盖



先关软件，再关电源



保养项目	保养方法	每日	每周	每月
清洁玻片架	当天工作完成后，使用自来水冲洗干净，晾干。	√		
清洁显示屏	用一块无绒布清洁TFT屏幕，使用屏幕清洁剂时遵循制造商说明。	√		
清洁防护罩	用一块软布清洁，必要时，使用清洁剂。	√		
清洁设备外壳	用一块软布清洁，必要时，使用清洁剂。	√		
清洁试剂缸	使用温水（不宜高于80℃）冲刷内、外污垢，必要时，使用清洁剂。		√	
清洁水洗缸	使用温水（不宜高于80℃）冲刷内、外污垢，必要时，使用清洁剂，并疏通底部出水小孔。		√	
清洁水箱	定期检查、清除底部残留物：水箱排水-清除污垢-水箱进水。			√
清洁烤箱	定期检查烤箱底部的石蜡收集盘是否有石蜡残留物，必要时进行清洁。			√
清洁液位传感器	用一块软布清洁表面污垢。			√
清洁过滤器	定期检查、排放内部污水、杂质。			√
清洁排水管	经常检查排水管是否积聚污垢，尤其是藻类，必要时进行清洁（先晃动排水管，使内部污垢、藻类松脱，再使用水冲洗；必要时，拆除排水管进行清洗）。为防止滋生细菌，必须用5%的次氯酸钠冲洗排液系统。但是，金属部件不得长时间接触该溶液（例如：整夜）。因此，在用次氯酸钠清洁后，用大量的水进行冲洗。			√
清洁废液池	经常检查废液池是否积聚污垢，必要时进行清洁。为防止滋生细菌，必须用5%的次氯酸钠冲洗排液系统。但是，金属部件不得长时间接触该溶液（例如：整夜）。因此，在用次氯酸钠清洁后，用大量的水进行冲洗。			√
清洁抽屉检测玻片架传感器	当抽屉检测玻片架不灵敏时，用一块软布清洁，必要时，使用清洁剂。			√
更换活性炭	建议每3个月更换。			√