

自动组织脱水机操作流程及注意事项

一. 解锁屏幕

按屏幕下方“**解锁**”，选择用户名并输入密码，点击“**登录**”，解锁屏幕。

二. 样本放置

点击“**开盖**”，待屏幕显示“**缸盖已经打开**”，打开组织缸缸盖，放入组织标本后，再关上缸盖，并用手轻压缸盖，以确保缸盖关闭到位，点击“**关盖**”，缸盖将被自动锁紧。

三. 运行脱水程序

方法1：点击“**选择程序**”→选择程序，如“**标准组织过夜**”→点击“**运行**”→确认放入组织标本后，选择试剂浸泡液位，放入一篮标本选择“**一篮**”，放入两篮标本选择“**两篮**”→根据液位提示进行确认，点击“**确定**”→点击“**立即启动**”或者输入预约结束时间点击“**延时启动**”→点击“**运行**”。

方法2：如果已经设置快捷程序，在主界面选择程序如“**标准组织过夜**”，其他步骤同方法1。

四. 取标本

程序运行完成后，选择“**全部**”排放液体，试剂排完后，缸盖会自动解锁，打开缸盖取出样本篮。

五. 运行清洗程序

取出样本篮后，关闭缸盖，在自动弹出的清洗程序窗口，选择“**标准清洗**”，设备将运行标准清洗程序。

六. 暂停或者终止程序

程序运行过程中，点击“**暂停**”，试剂泵入或者泵出组织缸后，程序将暂停。程序暂停时，点击“**继续**”，程序将继续运行；点击“**终止**”，试剂泵出组织缸后，程序终止。

* . 注意事项

1. 开始脱水程序前检查试剂瓶液位及蜡缸液位是否足够；
2. 取出样本篮时请注意避免样本篮上的残蜡滴入电子锁孔；
3. 更换试剂后请注意拧紧试剂瓶盖防止泄露；
4. 定期清理组织缸、密封圈、液位传感器探头，防止石蜡或其他杂质附着；
5. 定期清理组织缸底部滤网，防止标本碎屑积累堵塞；
6. 注意仪器显示的各项信息，及时采取相应的措施。